

Ag

SARS-CoV-2 Antigen test


Technologie Black Gold Particle

minut a je hotovo



Diferencovaná technologie konjugace černého zlata

COVID-19 Ag

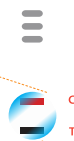

Duální systém barev





Použití	Detekce SARS-CoV-2 antigenu
Balení	2 Testů kit
Skladování	1
Typ vzorku	nasopharynx nasopharyngeal
Expirace	12 měsíců od data výroby
Odečet výsledků	minut

# COVID-19 Rapid Diagnostic Test

## POSTUP


Insert the swab specimen and swirl the swab 5-10 times.

Remove the swab while gently squeezing the head of the swab.

Close the assay diluent tube with a filter cap securely.

Invert the assay diluent tube and gently squeeze it to draw 3-4 drops (90~150µl) into a sample well on the device.

Read the result within 5-8 minutes.

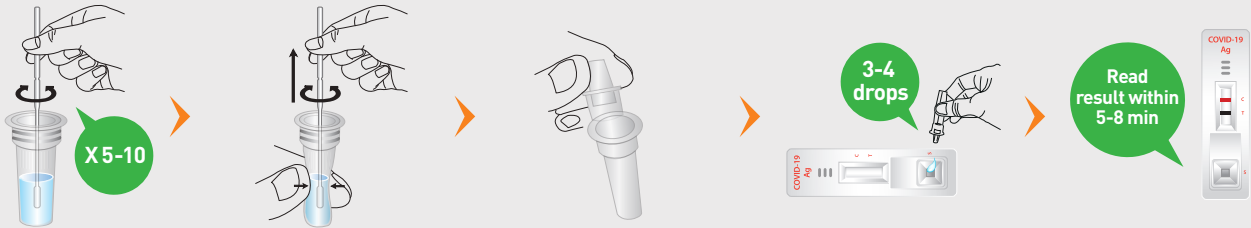

## INTERPRETATION

NEGATIVE




One red line "C" within the result window.

POSITIVE



Two bands, **black** To test line and **red** "C" control line within the result window.

INVALID

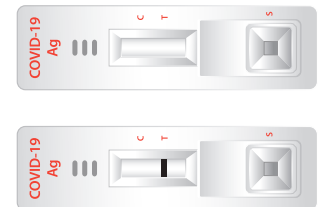

No "C" line within the result window. It is recommended that the specimen be retested.

